



フォルテオ®皮下注キット600μg をお使いの患者さんへ

～保管について気を付けていただきたいこと～

1

使用前も使用開始後も 冷蔵保管(2~8℃)をお願いします。

- ポイント
- 自宅に持ち帰ったら速やかに冷蔵庫に入れてください。
 - 使用した後も速やかに冷蔵庫に戻してください。

冷蔵庫
(2~8℃)に
保管する



2

注射針を取り付けたまま保管しないでください。


- ポイント
- 注射針を取り外し、白いキャップを取り付けた状態で保管してください。
※注射針をつけたままで保管すると気泡が入るおそれがあります。

3

アルコール綿と一緒に保管しないでください。

- ポイント
- アルコール綿をフォルテオ®皮下注キットに直接ふれる状態で保管しないでください。
 - お手入れの際には水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。(アルコール綿では拭かないこと)
※カートリッジホルダーが外れるなど故障の原因になります。

アルコール
綿

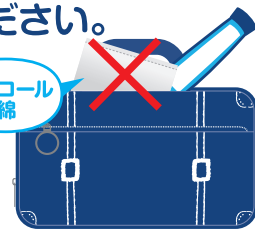

4

凍結にご注意ください。

- ポイント
- 冷凍庫や冷蔵庫の吹き出し口近くにおかないでください。
 - 凍結したフォルテオ®皮下注キットは使用しないでください。
※一度凍結したものは融かしても期待する効果が得られない可能性があります。



これらの現象が
見られた場合、
凍結した可能性が
あります!

- 注入ボタンは押し込むことができても薬液が排出されない。(ピストン棒やゴム栓が動かず、薬液が減らない)
- 注入ボタンを押しこむ圧力が通常に比べて明らかに軽い。
- ゴム栓に亀裂が発生したり、膨張したりする。
- カートリッジにひび割れができる。

日本イーライリリー製品に関するお問い合わせ先

患者様向け
フォルテオ®
電話相談窓口

フリーダイヤル

0120-52-10-52

通話料は無料です。
携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

通常電話番号

078-242-3649

フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号におかけください。なお通話料はお客様負担となります。

相談窓口受付時間

9:00~17:00

年中受付

日本イーライリリー株式会社

www.lillyanswers.jp

最新の製品情報や製品についてよくある質問を
こちらからご覧いただくことが出来ます

FRT-N026 (R1)
2018年3月