

ヒューマトローペン® 6mg、12mgをご使用の患者さんへ

ヒューマトローペン® 6mgまたは12mg ご使用にあたっての注意点

ヒューマトローペン® 6mg またはヒューマトローペン® 12mg のご使用にあたり、次の点にご注意ください。

カートリッジ内の残量が少ないとき



残量が十分なら、注射終了時に投与量表示窓「0.00」になります。「0.00」以外の数字が現われたとき、この数字は投与されなかったお薬の量を示しています。

この場合、無理に注入ボタンを押し込まず、投与されなかったお薬の対処については、**主治医から指示された方法に従ってください。**

例

1.20 に設定して注射したところ、注射後の表示窓の数字が 0.50 になっていた場合はカートリッジ残量が設定量の 1.20mg より少なかったため、0.70mg は投与できたが 0.50mg は投与できなかった、ということになります。

※図はヒューマトローペン® 12mg です

Lilly Answers リリーアンサーズ www.lillyanswers.jp 日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

一般の方・患者様向け

0120-245-970 ※1 **078-242-3499** ※2

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

※2 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。

※3 祝祭日及び当社休日を除きます。

製造販売元<資料請求先>

日本イーライリリー株式会社

〒651-0086 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号

www.lillyanswers.jp

最新の製品情報や製薬についてよくある質問をこちらからご覧いただくことが出来ます

(当社製品に関するお問合せ)

●受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30 ※3

(当社注入器に関するお問合せ)

●受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00

●上記時間外は音声ガイダンスにて対応しています

HMT-N015(R1)

2017年2月作成

Lilly