


日本イーライリリーのインスリン製剤を ご使用の患者さんへ

キャップの取り外しにご注意ください!

キャップの
取り外し
編

ミリオペン®は、四角い形状をしていますので、

キャップをねじって取り外そうとするとキャップが外れなくなることがあります。

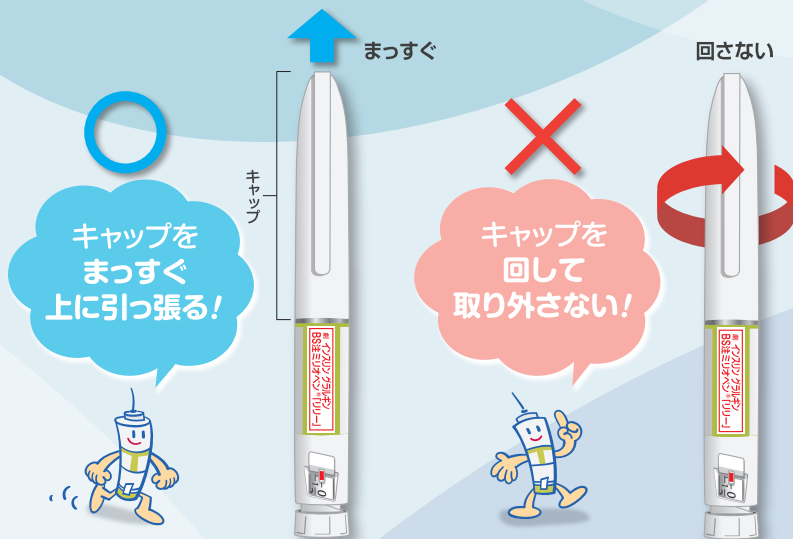

もし、キャップが外れない時は、キャップとペン本体を少し回して、
四角い側面が合うように戻してください。

ヒューマリン® ミリオペン®, ヒューマログ® ミリオペン
についても同様にご注意ください。



※インスリン グラルギン BS注射カート・ミリオペン®[リリー]は日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社と販売提携をしています。

日本イーライリリー製品に関するお問い合わせ先

Lilly Answers リリーアンサーズ 日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

一般の方・患者様向け

0120-245-970※1 **078-242-3499**※2

www.lillyanswers.jp

最新の製品情報や製品についてよくある質問を
こちらからお問い合わせいただくことが出来ます

(当社製品に関するお問合せ)

●受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30 ※3

(当社注込器に関するお問合せ)

●受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00

●上記時間外は音声ガイダンスにて対応しています

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

※2 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。

※3 祝祭日及び当社休日を除きます。