

## よくある質問

Q. 薬液の中に気泡があった場合は、どうしたらいいですか？

A. 注射器は、皮下に薬液を注射します。皮下注射では、薬液の中に気泡があっても問題はなく、気泡は人体や投与量には影響ありません。

Q. キャップを外した後、針先から薬液がもれていた場合は、どうしたらいいですか？

A. 針先にしずくがついている程度であれば問題ありません。投与量には影響ありません。

Q. 緑色の内筒が詰まっていたり、壊れたりして押し込めない場合はどうしたらいいですか？

A. ■ 本剤の使用をやめてください。  
■ 針を皮膚から抜いてください。  
■ トルツ【お問合せ窓口】0120-526-382までお問い合わせください。

Q. 注射が完了したことを確認するにはどうしたらいいですか？

A. 緑色の内筒が外筒から透けて見えていて、灰色のゴムピストンが注射器本体の針の根元まで押し込まれていれば、注射は完了しています。

トルツ皮下注80mgシリンジについてお尋ねになりたい・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合

本剤を正しく安全に注射できる方法をご理解いただくことが大切です。  
本剤についてご質問がある場合は：

- 主治医にご相談ください。
- トルツ【お問合せ窓口】0120-526-382までお問い合わせください。
- [www.taltz-patient.jp](http://www.taltz-patient.jp)をご覧ください。



## トルツ皮下注80mgシリンジの保管方法

2面

### 守っていただくこと



本剤は**外箱に入れたまま、冷蔵庫（2～8℃）に遮光保存してください。**  
やむを得ず冷蔵保存できない場合は、室温（30℃以下）で遮光保存し、5日以内にご使用ください。



本剤を冷蔵庫から取り出し、ご使用になる前に30分間、**室温に置いておくことが望ましいです。**

### してはいけないこと



本剤を**凍結させないでください。**もし凍結させてしまった場合は、**使用しないでください。**



本剤を電子レンジで温めたり、お湯をかけたり、直射日光の当たるところに**放置しないでください。**

本剤を**激しく振らないでください。**

お問合せ先：

いつも そばに

トルツ【お問合せ窓口】 **0120-526-382**（一般の方・患者様向け）

**Lilly Answers** リリーアンサーズ  
日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口  
**0120-360-605**（医療関係者向け）  
[www.lillymedical.jp](http://www.lillymedical.jp)

鳥居薬品株式会社 お客様相談室  
**TEL 0120-316-834**  
[www.torii.co.jp](http://www.torii.co.jp)（医療関係者の皆様へ）

製造販売元

**日本イーライリリー株式会社**  
神戸市中央区磯上通5丁目1番28号

販売提携

**鳥居薬品株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-4-1

®：登録商標

Copyright © 2016, Eli Lilly and Company. All rights reserved.

改訂年月：2018年8月

IT0324JJAI




## 取扱説明書

ヒト化抗ヒト IL-17Aモノクローナル抗体製剤  
生物由来製品・劇薬・処方箋医薬品\*

**トルツ** 皮下注 80mg シリンジ

イクセキズマブ（遺伝子組換え）注射液  
\*注意—医師等の処方箋により使用すること

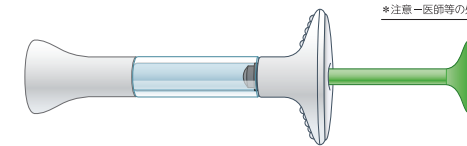

トルツ皮下注80mgシリンジ（以下、本剤）をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、その指示に従ってください。

この注射器は患者様の声を元に、簡単に使用いただけるように設計されています。



## トルツ皮下注80mgシリンジをご使用になる前に： 以下のことにご注意ください。

- 必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、その指示に従ってください。必要な時にご覧いただけるよう、この取扱説明書は保管してください。
- 本剤は、1回使い切りの注射剤です。注射器には1回分の薬液があらかじめ充填されています。1回で全量を使用します。
- この取扱説明書の「1 準備」の項をお読みになり、主治医にご相談のうえ、適切な注射部位を選んでください。



0324




裏返して「取扱説明書」をお読みください



## 取扱説明書

本剤をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、その指示に従ってください。

## 各部の名称

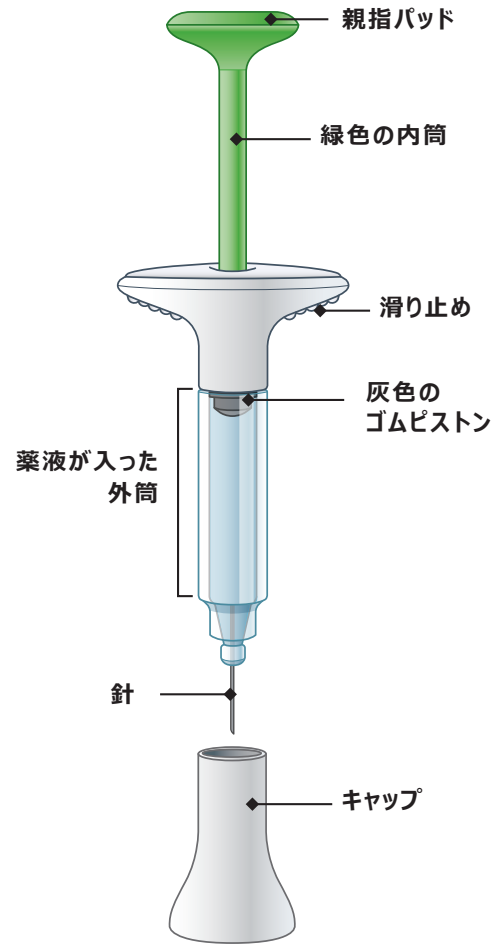

## 1 準備

1-1 本剤を冷蔵庫から取り出してください。注射の準備が整うまで注射器のキャップをつけたままにしておいてください。ご使用になる前に本剤を**30分間、室温に置いておくことが望ましいです**。薬液を室温に戻すことで、注射しやすくなります。

30分間

本剤を電子レンジで温めたり、お湯をかけたり、直射日光の当たる場所に**放置しないでください**。

1-2 注射に必要なものをそろえてください。

- 消毒綿1枚
- カット綿又はガーゼ\*1枚  
\*：注射完了後、注射部位にあてます。消毒綿で代用可能です。
- 廃棄用の容器（専用廃棄用ボックス又はふたのできる、穴の開かない容器）1個




注射器の外側に傷がないか確認してください。注射の準備が整うまで注射器のキャップをつけたままにしておいてください。ラベルに「トルツ皮下注80mgシリンジ」と書かれていること及び使用期限が切れていないことを確認してください。

中に入っている薬液は無色か、わずかに黄色がかったりします。

次のような場合には、本剤を**使用せず**、医療従事者の指示に従ってください。

- 使用期限が切れている。
- 破損している。
- 薬液が濁っている、明らかな褐色をしている、小さな異物が混入している。

1-4 注射の前に手を洗ってください。

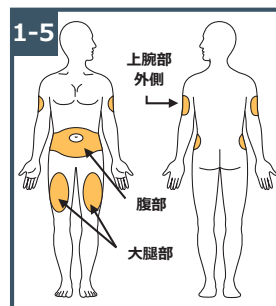

注射部位を決めてください。


太もも（大腿部）、お腹（腹部）又は二の腕（上腕部）の外側に注射できます。二の腕の外側に注射する場合は、操作方法の訓練を受けた方の手助けを受けてください。

皮膚に痛み、あざ、赤みがある部位や硬くなっている部位、傷跡や妊娠線がある部位、又は乾癬の部位には**注射しないでください**。へその周辺（3cm以内）には**注射しないでください**。

部位の中の注射する場所は**毎回変更してください**。からだの同じ部位に注射してもよいですが、注射する場所は前回から変えてください。

1-6 注射部位の準備をしてください。皮膚を消毒綿で消毒してください。注射の前に注射部位を乾かしてください。


## 2 注射

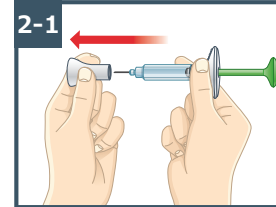

キャップを引っ張って外し、捨ててください。


針が破損したり、針でけがをすることがあるので、キャップは**元に戻さないでください**。

**針に触らないでください**。

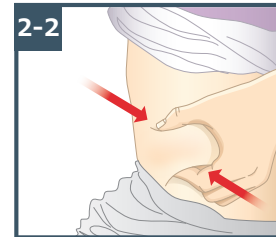



注射する部位の皮膚をかるくつまんでください。

腹部への注射の例

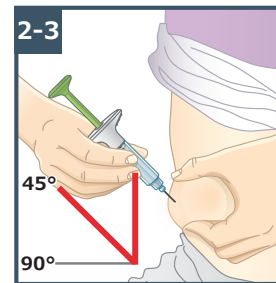

皮膚に対して、**45°の角度**で針をさしてください。その後、つまんだ皮膚を放しても構いません。

針はきちんとささった状態にしておいてください。

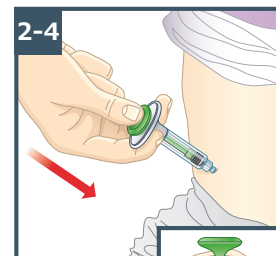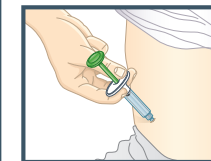

緑色の内筒を押し込んでください。

薬液がすべて注射されるまで、緑色の内筒をゆっくり押し込みます。灰色のゴムピストンが注射器本体の針の根元まで来るように押し込んだ後、ゆっくりと皮膚から針を抜きます。


カット綿又はガーゼを注射部位にあててください。あざになることがありますので**注射部位はもまないでください**。少し出血することがありますが、問題ありません。

注射が完了していれば、緑色の内筒が外筒から透けて見えます。



## 3 廃棄

1面

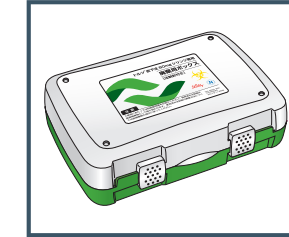

（図は、専用廃棄用ボックスを示しています）

**キャップは元に戻さないでください**。使用済みの注射器は、専用廃棄用ボックスに入れる、又は専用廃棄用ボックスが無い場合はふたのできる、穴の開かない容器に入れてください。

使用済みの注射器は、主治医の指示に従って廃棄してください。

## 安全にご使用いただくために

- 本剤についてご質問やご不明な点がある場合は、主治医にご相談いただくか、トルツ【お問合せ窓口】0120-526-382までお問い合わせください。
- 本剤を目の不自由な方がご使用になる場合は、操作法の訓練を受けた方の手助けを受けてください。
- 注射器を再利用したり、他人と**共用しないでください**。感染症がうつるおそれがあります。
- 本剤は子供の手の届かないところに保管してください。

↑「取扱説明書」はここを開いてお読みください↑

↓ 裏面に続きます ↓

↑ ここを開いて開いてください ↓